

カーボテクト

Carbotect



特長

- アクティブ電極先端の組織付着を軽減
- アクティブ電極先端の炭化を軽減
- 単回使用
- 使用方法が簡単
- クリーニングの手間を軽減

未使用例



使用例




Easy-to-Use electrocautery coating

インストルメントへの炭化 (Carboⁿized) 組織の付着を防ぎ (protect)、クリーニングの手間を軽減します

使用方法

- 1 外装の滅菌パックを開け、本品を滅菌野に置きます。
スポンジパッドから背面部の紙を外し、滅菌ドレープにスポンジパッドを貼り付けてください。
- 2 ボトルのキャップを外し、スポンジパッドの上に液体を付け、電極先端に塗布します。
またはボトル内に、電極先端を差し入れます。
- 3 均一に塗布するためにスポンジパッド上で電極先端を拭いて調節します。適時、繰り返します。

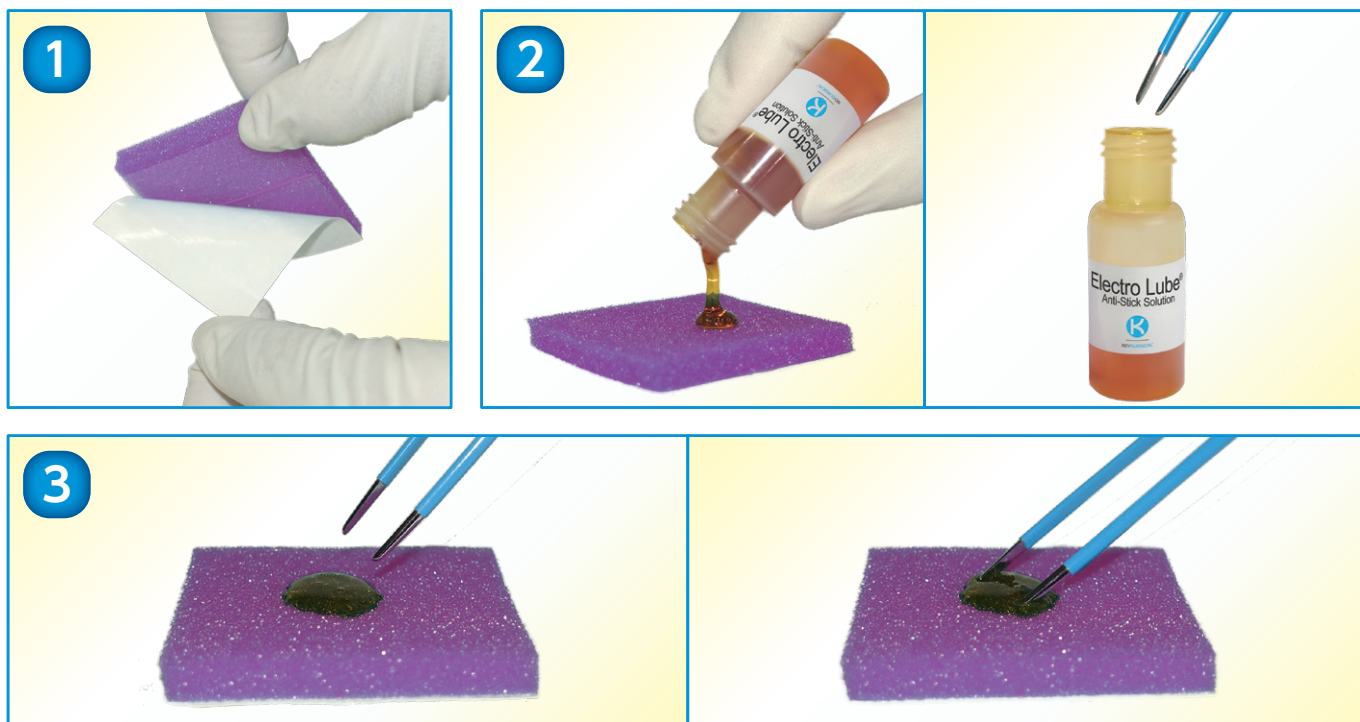

スポンジパッドとボトル (液体) がセパレートされていますので、インストルメントの形状に適した液量の調整が可能になりました。

型番	販売名	梱包数/箱
EL101	カーボテクト	20個

医療機器届出番号：27B1X00111000006

■製造業者
Key Surgical LLC
アメリカ合衆国

■代理店

■製造販売業者
株式会社アダチ **adachi**
〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目2番10号
TEL: 06-6942-3371 FAX: 06-6943-9181